



- 1- Appliquer du GC Cocoa Butter à l'intérieur de la matrice
- 2- Utiliser des coins de formes anatomiques pour une meilleure adaptation et points de contact
- 3- Utiliser des anneaux de serrage du système matriciel pour agir comme séparateur des dents et assurer de bons points de contacts
- 4- Appliquer GC Cavity Conditioner (10 sec) ou Dentin Conditioner (20 sec)

- 5- Rincer soigneusement et sécher modérément; ne pas déshydrater
- 6- Tapoter la capsule pour détasser la poudre. Enfoncer entièrement le piston
- 7- **Ne plus cliquer avant de mélanger.** (nouvelle méthode de percussion Push & Mix®)
- 8- Vibrer 10 sec. Le temps de travail est de 1'30" à partir du début du mélange
- 9- Insérer la capsule dans l'applicateur de capsule. Cliquer deux fois pour l'activer

- 10- Appliquer rapidement
- 11- Mettre en bloc et contourer.
- 12- S'assurer de la prise complète de EQUIA Forte HT Fil et retirer doucement l'anneau.
- 13- Finition 2'30" après le début du mélange
- 14- Appliquer EQUIA Forte Coat pour terminer la restauration. Ne pas souffler d'air
- 15- Photopolymériser pendant 20 sec.