

# everX Flow от GC

## Здрав до сърцевината



**Bulk  
цвет**  
за дълбоки  
кавитети

**Dentin  
цвет**  
за високо  
естетични  
резултати



Подгответе кавитета



В случай на Клас II кавитет, изградете липсващите стени с конвенционален композит



Изпълнете кавитета с everX Flow



Окончателен резултат след покриване със стандартен композит

everX Flow	
012900	everX Flow, Шприца 2 ml (3.7 g) Bulk EEP
012901	everX Flow, Шприца 2 ml (3.7 g) Dentin EEP

### Открийте също и



G-Premio BOND  
Универсален свързващ агент



G-aenial Universal Injectable  
Високо-якостен, инжектируем възстановителен материал



Essentia Universal  
Универсален композит

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND и G-aenial Universal Injectable са търговски наименования на GC. Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ и Tetric EvoFlow Bulk Fill не са търговски наименования на GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCЕЕО Bulgaria  
BG - София 1202  
ул. "Будапеша" 92, ап. 4-3  
Тел. +359.2.983.30.30  
Факс. +359.2.858.31.37  
info.bulgaria@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

ZOLF BG 19 02 07/19



## Здрав до сърцевината

everX Flow™  
от GC

Композит, подсилен с  
къси влакна за заместване  
на дентина

# everX Flow от GC

## Здрав до сърцевината


Открийте **everX Flow**, подсилен с къси влакна течен композит, създаден за **заместване на дентина и подсилване на възстановяванията**. Следвайки принципите на железобетонните конструкции, стъклените влакна в everX Flow подсилват възстановяванията и ги **защитават от пукнатини**.

Със своето лесно нанасяне, двата си цвята и невероятната си здравина, everX Flow е на път да се превърне във **Вашия предпочитан продукт за възстановявания със здрава сърцевина**, както и за **изграждане на пълчета**.



### Превъзходна якост на фрактуриране за надеждни дълготрайни възстановявания

По-голямата част от композитите предлагат перфектни качества за заместване на емайла: голяма износостойчивост и естетика. Те обаче, не могат да се сравняват с дентина, когато става въпрос за фрактурна устойчивост. everX Flow преодолява този проблем и предлага **отлична фрактурна якост, близка до тази на дентина**, благодарение на **голямото количество къси влакна**, здраво свързани със смолата. Това позволява на материала **ефикасно да подсилва големи дистални възстановявания** в комбинация със стандартен композит като емайлов слой.

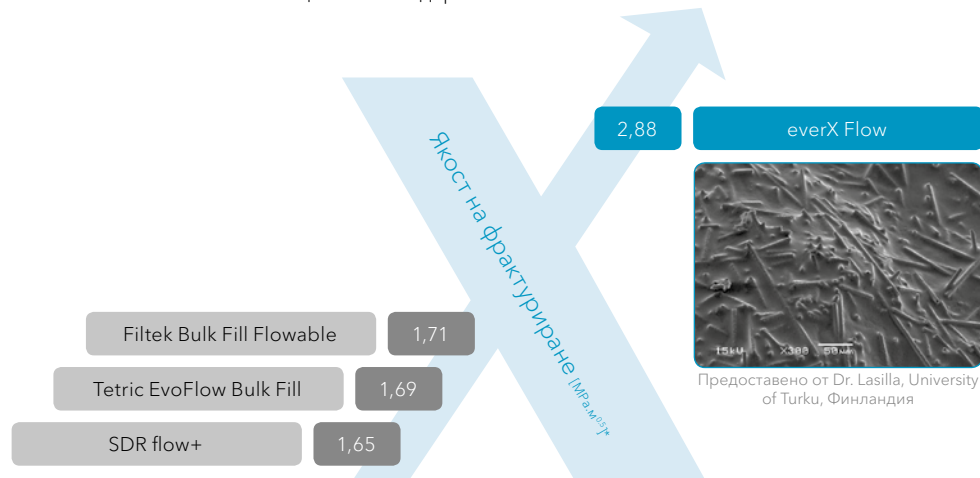


\* Източник: GCC R&D - налични данни. Тестът е извършен според ASTM E399-90 (1997).

### Перфектна тиксотропност, лесно нанасяне и страхотна адаптация



Благодарение на оптималната си тиксотропност, everX Flow лесно ще се **адаптира към всяка подготовка** и ще **избегне шуплите**. Контролираното му разтичане също ще позволи лесно нанасяне в горни молари, **без да изтече**.

Предоставено от Dr. Javier Tapia Guadix, Испания

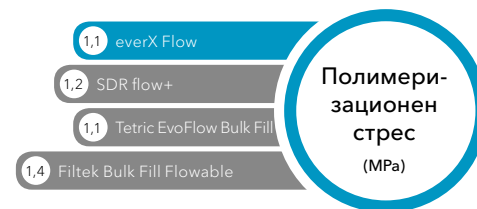

Източник: GCC R&D - налични данни.

### Два цвята, отговарящи на всички Ваши нужди



Оптимален за **дълбоки дистални кавитети**



Оптимален за **по-естетични резултати** и за **изграждане на пълчета**

### Оптимален за подсилване на обширни кавитети и постигане на дълготрайни естетични резултати



Предоставено от Саогу Бенджип, Германия

Предоставено от Др. Луиде Далан, Франция