

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

ÄTZMODUSAUSWAHL



10-15 Sek. anätzen, 5 Sek. abspülen und trocknen.

BONDINGVERFAHREN



G-Premio BOND auftragen und 10 Sek. warten.



Composite auftragen.



Trocknen.



Lichthärten.

Polymerisationszeit

Polymerisationsgerät	Abstand zur Lichtleiterspitze	
	<10mm	>10mm
Halogen / LED (700mW/cm ²)	10 Sek.	20 Sek.
Hochleistungs-LED (>1200 mW/cm ²)	5 Sek.	10 Sek.

INTRAORALE REPARATUR



Oberfläche anrauen,
abspülen und
trocknen.



G-Multi PRIMER auf
die Keramikoberfläche
auftragen. Trocknen.



G-Premio BOND auf
die gesamte Ober-
fläche auftragen und
10 Sek. warten.



Trocknen.



Lichthärten.

HYPERSENSIBILITÄTSBEHANDLUNG



G-Premio BOND
auftragen und
10 Sek. warten.



Trocknen.



Lichthärten.



Entfernen der
nicht-polymerisierten
Schicht.