

# Čirý jako sklo



## EXACLEAR od GC

Čirý vinyl polysiloxanový materiál

Partner GRADIA® PLUS  
pro transparentní práci

- Dokonalá kontrola každého detailu
- Jednoduché zpracování
- Rychlé tuhnutí

# EXACLEAR a GRADIA PLUS

od GC

EXACLEAR je velmi vhodný k vytváření dočasných korunek a fazet. Použití GC GRADIA PLUS Light Body je mnohem snadnější a také technicky méně náročné než při použití akrylátu. Materiál jednoduše vstříknete do silikonového klíče zhotoveného z EXACLEAR!

Díky vysoké průhlednosti máte skvělou vizuální kontrolu a účinné polymerace lze dosáhnout prosvícením přes silikonový klíč. Materiál je pevný, ale pružný a může být odstraněn a vrácen do původní polohy bez roztržení.

Prostor může být využit pro pokrytí Heavy Body Enamel HB-EL nebo HB-ED. Konečná barevná charakterizace a glazování povrchu pomocí Lustre Paint je už jen dokonalou tečkou!



OTiskovací lžice naplněná EXACLEAR a umístěná na wax-up modelu.



Připravený model izolovaný silikonovým separátorem a preparované zuby ošetřené GC GRADIA PLUS separátorem.



Vstříknutí Light Body.



Kompozit je vytvrzený světlem přes mimořádně čirý silikonový klíč z EXACLEAR.



Po odstranění silikonového klíče a vstřikovacích kanálků.



Dočasná náhrada dokončená s použitím Lustre Paint.

## Váš partner pro všechny klinické případy



Dočasné abutmenty na implantát s opákní vrstvou GRADIA PLUS a vyztužením s GC Stick.



Injektovaný a polymerovaný odstín Light Body.



Po očištění a ořezání na dostavě.



Modifikování povrchu s Lustre Paint, překrytí s odstínem Heavy Body Enamel HB-EL nebo HB-ED.



Výsledná náhrada dokončená s Lustre Paint CLF.



Obrázky: Stephen Lusty, Spojené Království  
EXACLEAR, GC Stick a GRADIA PLUS jsou obchodní značky GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Czech Republic  
V Olšinách 82  
CZ - 100 00 Prague 10  
Tel. +420.274.771.965  
Fax. +420.274.771.965  
info.czech@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**GC**