

Voyez clair



EXACLEAR de GC

Vinyl Polysiloxane transparent
partenaire du GRADIA®
PLUS pour vos travaux en
toute transparence

- Excellent contrôle des détails
- Manipulation aisée
- Prise rapide

GC

EXACLEAR et GRADIA PLUS

de GC

EXACLEAR est très utile pour créer des couronnes ou des facettes provisoires. L'utilisation du GC GRADIA PLUS Light Body plutôt que de l'acrylique est plus facile et moins sensible à la technique. Il suffit d'injecter le matériau dans l'empreinte silicone EXACLEAR !

Vous bénéficiez d'un contrôle visuel optimal grâce à la transparence élevée et à la polymérisation efficace obtenue par photopolymérisation à travers l'empreinte. Le matériau est ferme mais flexible et peut être retiré et repositionné facilement, sans se déchirer.

Un espace peut être réservé pour le Heavy Body Enamel HB-E. La caractérisation finale et le glaçage avec Lustre Paint sont comme la cerise sur le gâteau !



EXACLEAR injecté sur un modèle formé sous vide, placé sur le wax-up.



Modèle préparé, enduit d'un séparateur de silicone sur les préparations et du GC GRADIA PLUS separator sur le reste.



Injection du Light Body.



Composite photopolymérisé grâce à la totale transparence de l'EXACLEAR.



Après le retrait du silicone et le grattage des événements.



Restaurations provisoires terminées avec Lustre Paint.

Votre partenaire dans les situations cliniques complexes



Piliers implantaires temporaires avec couche opaque de GRADIA PLUS et renfort Stick-Tech



Light Body injecté et photopolymérisé



Après grattage et cut-back des restaurations.



Modification de surface avec Lustre Paint, recouvert de Heavy Body Enamel HB-E.



Cas terminé avec Lustre Paint CLF.



Cas : Stephen Lusty, Royaume-Uni
EXACLEAR, Stick-Tech et GRADIA PLUS sont des marques déposées GC

GC

GC EUROPE N.V. - Head Office
Researchpark, Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tél. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.48.32, info.gce@gc.dental, <http://www.gceurope.com>

GC Europe NV, Benelux Sales Department
Researchpark, Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven,
Tél. +32.16.74.18.60, info.benelux@gc.dental, <http://benelux.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH - Swiss Office
Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern, Tél. +41.41.520.01.78, Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental, <http://switzerland.gceurope.com>