

# Een heldere blik



## EXACLEAR van GC

Materiaal van transparant  
vinylpolysiloxaan

PARTNER VAN GRADIA® PLUS  
voor transparant werk

- Uitstekende controle van details
- Gemakkelijk te verwerken
- Snelle uitharding

# EXACLEAR en GRADIA PLUS

van GC

EXACLEAR is zeer nuttig om tijdelijke kronen of veneers te maken. Het gebruik van de GC GRADIA PLUS Light Body in plaats van kunststof is eenvoudiger en minder techniekgevoelig. Spuit het materiaal gewoon in de EXACLEAR sleutel!

U heeft optimale visuele controle door de hoge transparantie en u kunt een efficiënte polymerisatie bereiken door lichtuitharding door de sleutel heen. Het materiaal is stevig maar flexibel en kan gemakkelijk worden verwijderd en verplaatst, zonder te scheuren.

Met One Body Light Body materiaal kan de volledige vorm geïnjecteerd worden. Lustre Paint kleuren kunnen ingezet worden om extern te karakteriseren en een lichtuithardende glanslaag aan te brengen.



Light Body (vb One Body) wordt geïnjecteerd door kanalen.



De stempelen worden voorbereid met een dun laagje was als cement spacer en GC Gradia separator.



Light Body (vb One Body) wordt geïnjecteerd door kanalen.



Composiet wordt uitgehard door de uiterst heldere EXACLEAR.



Na verwijderen van de EXACLEAR mal en afslijpen van de kanalen.



Tijdelijke restauraties afgewerkt met Lustre Paint.

## Uw partner in complexe klinische situaties



Tijdelijke implantaatabutments met opaker laag GRADIA PLUS en GC-stickversterking



Ingespoten en uitgeharde Light Body.



Cut Back tot dentine niveau, zandstralen en Ceramic Primer aanbrengen.



Na injectie van LB base E om de glazuur laag en finale contour te restaureren, zandstralen, Ceramic Primer.



Laatste casus afgewerkt met Lustre Paint CLF.



Casussen: Stephen Lusty, Verenigd Koninkrijk  
EXACLEAR, GC Stick en GRADIA PLUS zijn handelsmerken van GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

**GC Europe NV**  
**Benelux Sales Department**  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16 74.18.60  
info.benelux@gc.dental  
<http://benelux.gceurope.com>

